


GEBRUIKSAANWIJZING

Deze zwangerschapstest helpt je om op een snelle en makkelijk manier te testen op een eventuele zwangerschap. De resultaten zijn zeer betrouwbaar (>99%) en makkelijk af te lezen. Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je gaat testen en laat zowel de test als urine op kamertemperatuur komen. Eerste ochtendurine bevat meestal de hoogste concentratie van hCG en is daarom het beste om te gebruiken bij het uitvoeren van de urinetest. Echter vanaf de eerste dag dat je menstruatie zou moeten starten, kun je op elk moment van de dag de test uitvoeren.

STAP 1

DIPSTICK

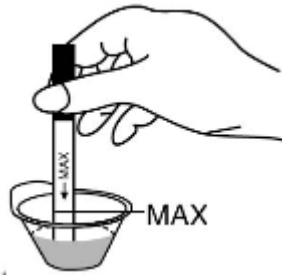


- Vang je urine op in een bakje (plastic/glas).
- Verwijder de verpakking van de test.
- Houd de test verticaal, doop de test zorgvuldig in het urinemonster met de pijl in de richting van de urine.
- Dompel de strip **niet** voorbij de max lijn in de urine.
- Houd de strip voor 10 seconden ondergedompeld en leg daarna de strip plat op een schoon, droog, niet-absorberend oppervlak. Start de tijd.

STAP 2 Wacht tot er één of twee gekleurde lijnen verschijnen. De resultaten dienen binnen 3-5 minuten geïnterpreteerd te worden. **Let op:** lees de resultaten niet meer af na 5 minuten

STAP 3 De uitslag aflezen

DIPSTICK

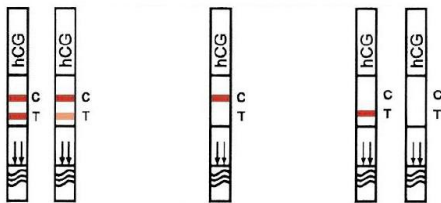

POSITIEF

NEGATIEF

**ONGELDIGE
TEST**

C = Controle lijn
T = Test lijn

POSITIEF (zwanger): er verschijnen twee verschillende rode lijnen, één in het testgebied (T) en één in het controlegebied (C). De intensiteit van de kleur van beide lijnen kan verschillen, omdat de verschillende stadia van een zwangerschap verschillende concentraties van het hCG hormoon hebben.

Zodra je positief test, neem dan contact op met je huisarts en verloskundige. Hij/zij dient de zwangerschap te bevestigen na evaluatie van alle klinische- en laboratorium bevindingen en kan advies geven omtrent de zwangerschap.

Belangrijk: Als de test lijn zwak is, is het raadzaam om de test na 48-72 te herhalen met de eerste ochtend urine.

NEGATIEF (niet zwanger): er verschijnt slechts één rode lijn in het controlegebied (C). Er is geen gekleurde lijn in het testgebied (T).


Er is onvoldoende hCG gedetecteerd om een zwangerschap vast te stellen. Wanneer je reden hebt om aan te nemen dat je toch zwanger bent, bijvoorbeeld door het uitblijven van je menstruatie, doe dan een nieuwe zwangerschapstest na 3 dagen nadat je menstruatie zou moeten beginnen. Mocht je wederom negatief testen en je menstruatie blijft uit, raadpleeg dan de huisarts.

ONGELDIG testresultaat: het resultaat is ongeldig als er geen gekleurde lijn verschijnt in het controlegebied (C), ook niet als er wel een lijn in het testgebied (T) verschijnt. Herhaal de test in dit geval met een nieuwe test. Als het probleem aanhoudt, stop dan met testen en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice.

Belangrijk: een heldere achtergrond in het resultaat regio kan worden gezien als een basis voor het effectief testen

STAP 1

MIDSTREAM

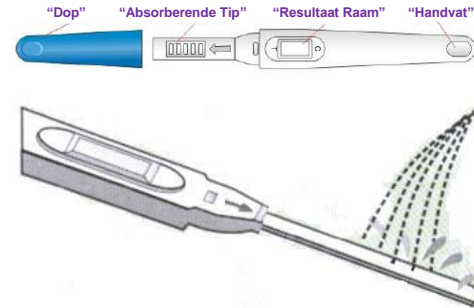

- Verwijder de verpakking
- Verwijder de dop en houd de midstream met de blootgestelde "absorberende tip" naar beneden wijzend direct in jouw urinestraal gedurende minstens 10 seconden totdat het goed nat is. Urineer niet over de rest van de midstream test.

Tip: Je kunt ook de urine opvangen in een schoon en droog bekertje (plastic/glas). Dompel dan alleen de "absorberende tip" in de urine gedurende minstens 10 seconden.

- Plaats onmiddellijk de dop over de "absorberende tip" nadat je klaar bent met het opvangen van de urine.
- Leg de midstream op een vlakke ondergrond met het "resultaat raam" naar boven. Start de tijd.

STAP 2 Wacht tot er één of twee gekleurde lijnen verschijnen. De resultaten dienen binnen 3-5 minuten geïnterpreteerd te worden. **Let op:** lees de resultaten niet meer af na 5 minuten

STAP 3 De uitslag aflezen

MIDSTREAM



POSITIEF

NEGATIEF

**ONGELDIGE
TEST**

C = Controle lijn
T = Test lijn